



Торгтехника.РФ
<https://obtorg.ru>

Локтевые настенные дозаторы
для мыла и дезинфицирующих средств
ES-1000 ED-1000



ES-1000 -для мыла

ED-1000 -для дезинфицирующих средств

инструкция пользователя

Уважаемые покупатели!

Спасибо, что выбрали продукцию нашей компании.
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией
перед монтажом и эксплуатацией устройства.

Устройства дозирующие локтевые настенные далее (устройства) предназначены для подачи мелких порций жидкостей, предназначенных для обработки кожных покровов.

Устройства предназначены для применения в организациях здравоохранения, на предприятиях пищевой отрасли, общественного питания, торговли, а рынках, предприятиях бытового обслуживания, коммунальных объектах и в быту.

Устройства удобны в пользовании, снижают расход моющих или дезинфицирующих средств, а также обеспечивают повышение санитарно-гигиенических требований по сравнению с мытьем поливом растворов из бутылок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Привод устройства - ручной.
2. Режим работы - многократный, циклический.
3. Максимальное усилие на рычаге не более 35 Н (3,5 кг).
4. Масса устройства- 370 г.
5. Габаритные размеры(В*Ш*Г): 230*115*190 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Устройство | 1 шт. |
| 2. Дюбель распорный | 3 шт. |
| 3. Саморез | 3 шт. |
| 4. Инструкция пользователя | 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Закрепите устройство к стене при помощи входящих в комплект поставки дюбелей и саморезов.

Перед установкой устройства обратите внимание на следующее:

- устройство должно быть расположено над раковиной или поддоном, для стекания капель с мокрых рук,
- под устройством должно быть свободное пространство не менее 15 сантиметров
- над устройством должно быть свободное пространство не менее 3 сантиметров, для снятия устройства со стены,
- высота крепления устройства 130 – 135 сантиметров от пола, до верха корпуса.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:


С помощью ключа откройте переднюю крышку устройства, залейте в емкость мыло или дезинфицирующее средство (в зависимости от используемого устройства), закройте крышку устройства и надавите на нее до щелчка.

Нажатием на рычаг произведите несколько качков для заполнения насосной системы до появления первой порции жидкости из трубки выдачи средства.

После этого устройство готово к работе. После каждого последующего нажатия на рычаг будет выдаваться мерная доза жидкости.

Нажатие на рычаг при дезинфекции рук производить локтем.

Длительные интервалы бездействия устройства не приводят к сбою его работы, если емкость остается заполненной.

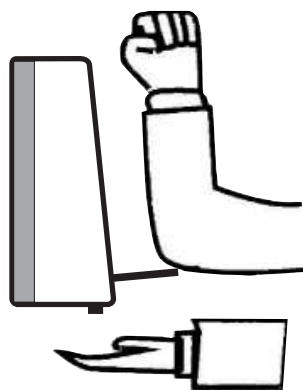

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Регулярно очищайте наружные поверхности устройства теплой мыльной водой. При необходимости проводите дезинфекцию наружных поверхностей 3% раствором перекиси водорода.

После чистки и дезинфекции наружные поверхности вытереть насухо.

Не пользуйтесь абразивными или содержащими хлор очистителями.

При засорении клапанов необходимо промыть насосную систему без разборки устройства. Для этого нужно залить в бутылку горячую (60-70 °C) воду и произвести многократные нажатия на рычаг, до восстановления нормальной работы устройства.

Гарантийный талон

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____